

Thursday, 23 February 2017 13:08

# Test FRPLumbar. Un uso fácil de EMG de superficie



José Montero Vilela, Francisco Parra González, Salvador Pitarich Corresa, David Garrido Jaén, Ignacio Bermejo Bosch\*, Javier Andrade Celdrán, Eduardo Parrilla Bernabé, Juan Alfonso Gómez Herrero

Instituto de Biomecánica (IBV). Universitat Politècnica de Valencia. Edificio 9C. Camino de Vera s/n (46022) Valencia

\* Grupo de Tecnología Sanitaria del IBV, CIBER de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (CIBER-BBN)

*El Instituto de Biomecánica (IBV) ha desarrollado la aplicación software, Test FRP Lumbar, específicamente diseñada para personalizar y agilizar la ejecución y obtención de resultados del protocolo Flexión-Relajación Lumbar.*

*La aplicación permite a los usuarios definir, de forma sencilla, mediante una interface gráfica e intuitiva, sus propios requisitos de ejecución del protocolo, y obtener los resultados de forma automática e inmediata.*

*Para registrar las variables que permiten evidenciar la aparición del fenómeno flexión-relajación lumbar, TestFRP/Lumbar utiliza un sistema de análisis de movimientos de la columna vertebral y miembros inferiores y utiliza un equipo de electromiografía de superficie (EMGS) para el registro de la actividad muscular.*

## INTRODUCCIÓN


Desde principios del año 2000, el Instituto de Biomecánica (IBV) dispone de la aplicación NedLumbar/IBV para la valoración funcional de lumbalgias. Un elevado número de usuarios de esta aplicación han manifestado su interés por realizar a sus pacientes, como prueba complementaria, un test de flexión-relajación lumbar.

La primera referencia del fenómeno de flexión-relajación (FRP) del raquis lumbar se encuentra en el artículo *The function of the erectors spinae muscles in certain movements and postures in man* (Floyd & Silver, 1955). Este fenómeno consiste en una disminución significativa de la actividad eléctrica de la musculatura extensora lumbar que se manifiesta mediante un silencio electromiográfico significativo hacia la fase final del movimiento de flexión del raquis lumbar y que persiste mientras el sujeto mantiene la posición de máxima flexión voluntaria (MFV). En esta posición el tronco se sustenta en modo pasivo por los elementos óseo-ligamentosos.

Por el contrario, en pacientes que sufren dolor lumbar es muy frecuente la ausencia de este fenómeno de silencio electromiográfico (Figura 1).

De los trabajos extraídos de la bibliografía puede concluirse que:

- ♦ La presencia de un fenómeno FRP permite detectar a los sujetos normales con un alto grado de especificidad.
- ♦ La ausencia de un fenómeno FRP permite detectar, con una alta sensibilidad, sujetos con dolor lumbar crónico.

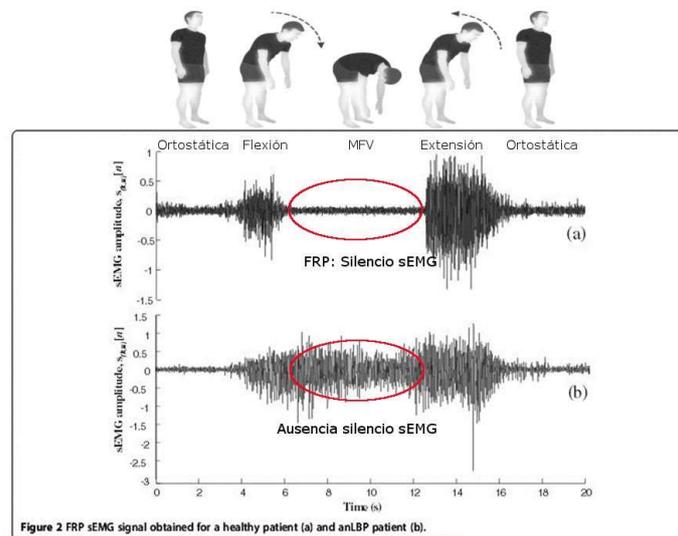

Gráficas EMG: Nougareou et al. EURASIP Journal on Advances in Signal Processing 2012, 2012:151

Figura 1. Presencia/ausencia de silencio electromiográfico en prueba de flexión-relajación lumbar

El fenómeno FRP puede evaluarse de forma cuantitativa, comparando la amplitud de la señal de EMGS en las diferentes fases del gesto: reposo en bipedestación, flexión, MFV y extensión para retorno a la posición inicial. Se calcula para ello los ratios tanto entre las amplitudes de la señal en las diferentes fases como entre sus valores eficaces (RMS).

## EL GESTO ANALIZADO

Las fases del gesto analizado se describen en la figura 1.

Se considera que existe acuerdo general en lo que se refiere a las fases de la cinemática de la ejecución del gesto:

- Fase1. Ortostática inicial: el sujeto permanece en reposo en posición ortostática.
- Fase2. Flexión: partiendo de posición ortostática, el sujeto realiza una flexión hasta la posición de MFV.
- Fase3. MFV: el sujeto mantiene la posición de MFV durante un tiempo preestablecido.
- Fase4. Extensión: el sujeto realiza el movimiento de extensión hasta recuperar la posición ortostática.

Fase5. Ortostática final: el sujeto alcanza y mantiene la posición ortostática. En caso de repeticiones continuas del gesto, esta fase coincide con la ortostática inicial de la repetición siguiente.

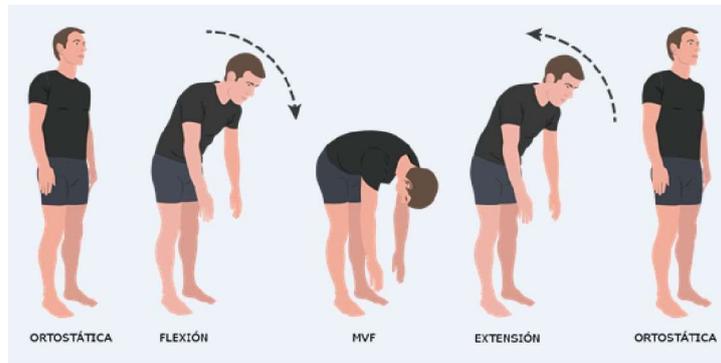


Figura 2. Secuencia de posiciones durante la ejecución del gesto en la prueba de Flexión-Relajación Lumbar

Habitualmente, en las pruebas de FRP se registran 2 ó 4 canales de EMGS. La aplicación **TestFRP/Lumbar** permite registrar hasta 4 canales, adquiriendo tanto las señales brutas como los valores eficaces de las mismas (RMS). Un ejemplo de registro de estas señales frente al registro cinemático del movimiento (ángulo de flexión lumbar) puede verse en la figura 2. En estas gráficas se muestran delimitadas las diferentes repeticiones del gesto (zonas coloreadas en verde), así como las fases dentro de cada una de estas repeticiones (líneas verticales a trazos).

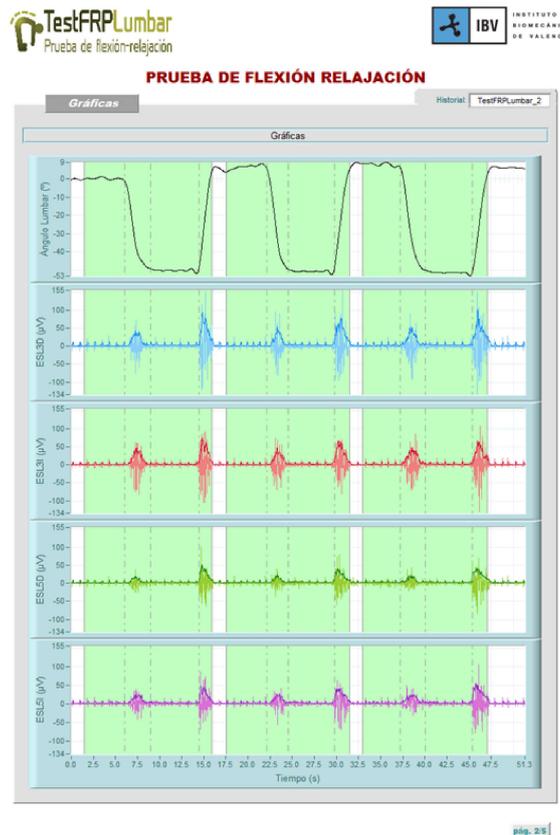


Figura 3. Señales de ángulo de flexión lumbar y EMGS durante una prueba TestFRPLumbar a un sujeto normal

## CRITERIOS DE VALIDACIÓN DEL PROTOCOLO

En la bibliografía científica no existe consenso sobre qué condiciones producen el FRP. Los principales puntos de discusión se centran en el rango lumbar, la velocidad de ejecución del gesto y el tiempo en fase MFV que son necesarios para la aparición de dicho fenómeno.

Para facilitar a los usuarios la realización de las pruebas de acuerdo a sus propios criterios, la aplicación **TestFRP/Lumbar** permite definir los límites válidos para los parámetros de ejecución de las pruebas (Figura 3):

- ◆ Rango mínimo de flexión lumbar.
- ◆ Velocidad durante la fase de flexión.
- ◆ Duración de la fase de MFV.
- ◆ Velocidad durante la fase de flexión.

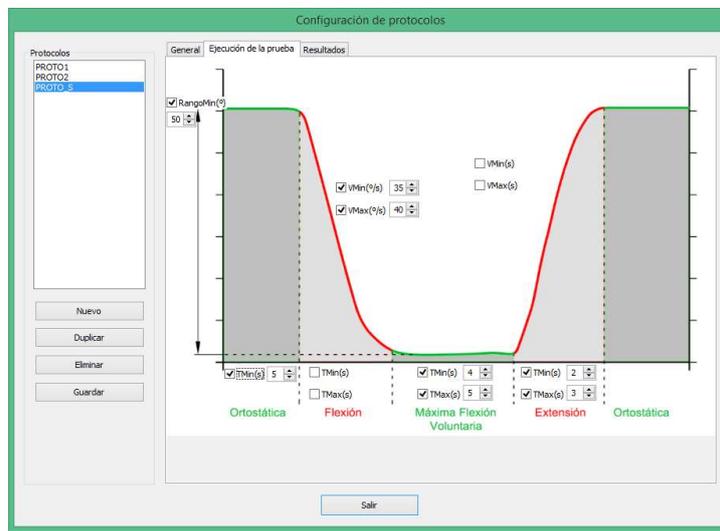


Figura 4. Configuración del protocolo de flexión-extensión lumbar en TestFRPLumbar/IBV

## EVALUACIÓN DE LA EXISTENCIA DEL FRP

Respecto a los criterios para evaluar la presencia/ausencia del FRP también existe controversia en la literatura científica. Algunos autores defienden que el nivel de actividad de la EMGS en términos absolutos es un parámetro robusto; sin embargo, otros autores han desarrollado diversas *ratios* entre los niveles de actividad EMGS en diferentes fases del gesto.

Como parte de la personalización del protocolo, el usuario también puede definir qué resultados desea que sean presentados, tanto en pantalla como en los informes generados por la aplicación (Figura 5):

- ◆ Rangos y velocidades del raquis lumbar, de la pelvis y de ambos conjuntamente.
- ◆ Señales medias y máximas RMS en las fases ortostática, de flexión, MFV y de extensión.
- ◆ Principales *ratios* publicadas en la literatura científica.

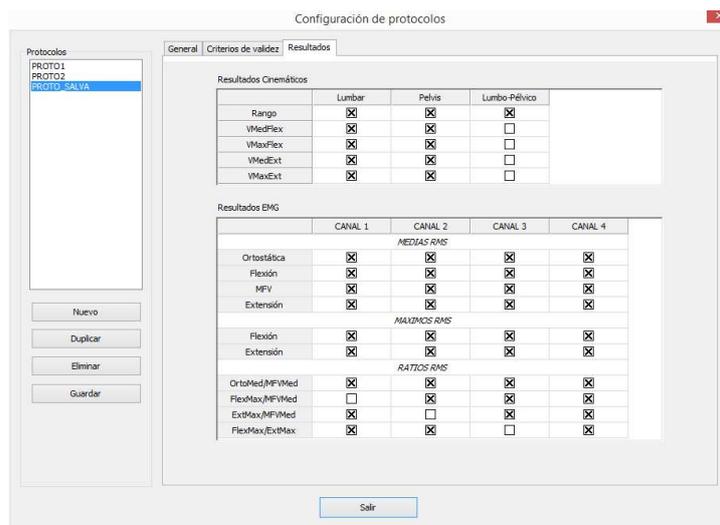


Figura 5. Configuración del protocolo. Selección de los resultados a obtener

## LA APLICACIÓN TestFRPLumbar/IBV

**TestFRP/Lumbar** es una aplicación *software* para la ejecución de protocolos orientados al análisis del fenómeno de Flexión-Relajación lumbar, especialmente diseñada para aportar versatilidad y agilidad a los expertos en valoración funcional instrumentada.

**TestFRP/Lumbar** utiliza como tecnología base un sistema de fotogrametría video para el análisis de movimientos de la columna vertebral y de miembros inferiores, y un equipo de EMGS para el registro de la actividad muscular.

Dada la diversidad de propuestas en la literatura científica, **TestFRP/Lumbar** permite al usuario definir sus propios protocolos, registrar los datos procedentes del sistema de análisis cinemático de movimientos y del sistema de EMGS. Una vez realizado el registro de los datos, la aplicación presentará los parámetros relativos a la ejecución del protocolo de forma automática (Figura 6 y Figura 7). El informe de la prueba también se genera de forma automática y el usuario puede configurar qué parámetros son de interés y desea que aparezcan reflejados.

En definitiva, **TestFRP/Lumbar** pone al alcance de los usuarios de las metodologías de valoración funcional IBV una herramienta que permite ejecutar una prueba de 2 minutos de duración, versátil y sencilla de utilizar, y que genera los resultados e informes de forma automática.

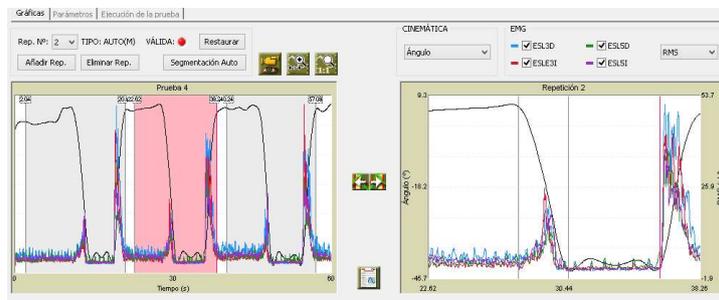


Figura 6. Segmentación automática de la prueba y gráficas de ángulo de FE lumbar y de 4 canales de EMGS

Parámetros										
Parámetros cinemáticos										
	RANGO (°)			VELOCIDAD MEDIA/MÁX (°/s)						
	Lumbar	Pelvis	Lumbo-Pélvica	Lumbar		Pelvis		Lumbo-Pélvica		
	Flexión	Extensión		Flexión	Extensión	Flexión	Extensión	Flexión	Extensión	
Repetición 1	50.52	68.98	119.68	16.5 / 38.6	34.6 / 46.9	24.5 / 43.3	32.4 / 55.7	41.0 / 70.9	67.0 / 102.1	
Repetición 2	57.58	60.42	118.10	22.9 / 43.3	30.1 / 40.3	25.8 / 35.7	26.1 / 53.3	48.8 / 77.8	56.1 / 91.8	
Repetición 3	59.45	61.80	121.22	19.5 / 38.7	30.4 / 39.3	22.0 / 33.9	28.9 / 46.7	41.6 / 65.2	59.3 / 83.3	
MEDIA	55.85	63.73	119.66	19.7 / 40.2	31.7 / 42.2	24.1 / 37.6	29.1 / 51.9	43.8 / 71.3	60.8 / 92.4	
DESVIACIÓN	4.71	4.60	1.56	3.2 / 2.7	2.5 / 4.1	1.9 / 5.0	3.2 / 4.7	4.3 / 6.4	5.6 / 9.4	

Parámetros EMG										
ESL3D	MEDIA RMS (µV)				RATIOS RMS					
	Ortoestática	Flexión	MFV	Extensión	OrtoMed/MFVMed	FlexMax/MFVMed	ExtMax/MFVMed	FlexMax/ExtMax		
Repetición 1	1.18	28.28	2.14	63.43	0.55	19.42	43.77	0.44		
Repetición 2	1.02	30.95	2.26	49.24	0.45	22.71	34.06	0.67		
Repetición 3	1.83	29.50	2.19	50.85	0.84	23.70	46.63	0.51		
MEDIA	1.34	29.58	2.19	54.51	0.61	21.94	41.49	0.54		
DESVIACIÓN	0.43	1.34	0.06	7.77	0.20	2.24	6.59	0.11		

Figura 7. Parámetros cinemáticos de los diferentes segmentos y de un canal de EMGS

**CONCLUSIONES**

La prueba de flexión-relajación lumbar es ampliamente aceptada como prueba complementaria en el ámbito de la valoración funcional de lumbalgias.

La diversidad de criterios en lo relativo a la ejecución del gesto propio del protocolo de flexión-relajación lumbar (FRP lumbar) hace necesario disponer de una aplicación que aporte flexibilidad a la hora de configurar los requisitos de ejecución, aunque manteniendo la automatización del análisis y la obtención de resultados.

**TestFRP/Lumbar** es de utilidad para los miembros de la Comunidad de Usuarios del IBV: Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, Servicios Hospitalarios con unidades de Rehabilitación y Fisioterapia así como para cualquier profesional experto en la Valoración del Daño Corporal, ya que es una herramienta que facilita al usuario la realización de pruebas FRP, en combinación con las pruebas de valoración funcional de lumbalgias realizadas mediante NedLumbar/IBV.

**AGRADECIMIENTOS**

A las mutuas **Egarsat** - Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 276, **Mutua Montañesa** - Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 7 y **MAZ** - Mutua Colaboradora con la Seguridad Social Nº11 por haber ofrecido *feedback* sobre la utilidad del **TestFRP/Lumbar** en la actividad de sus laboratorios de valoración biomecánica.

INSTITUTO DE BIOMECÁNICA DE VALENCIA

Revista anual creada en 1993 por el Instituto de Biomecánica (IBV) / ISSN: 2444-037X  
 No puede reproducirse, almacenarse en un sistema de recuperación o transmitirse en forma alguna por medio de cualquier procedimiento sea éste mecánico, electrónico, de fotocopia, grabación o cualquier otro, sin el previo permiso del editor.